


5-9.『グループ』について


- グループ情報は事前にご提出いただいた情報で登録されています。
- グループリーダーが変更や、グループメンバーの追加削除が発生した場合は、設定の変更が必要になります。
- 新たなグループの作成も可能です。

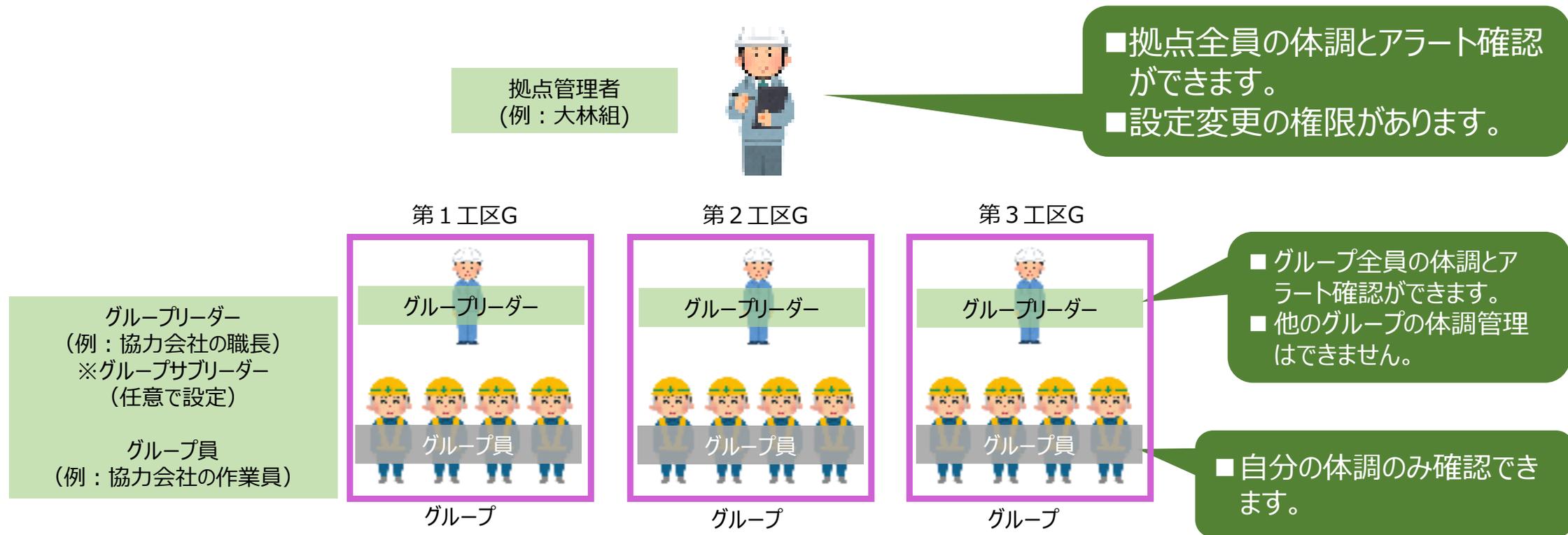

グループを設定することで、より早く熱中症などの体調変化に対応が可能となり、現場全体の監視が徹底されます。

※サブリーダーの閲覧権限はリーダーと同等ですが、リーダーの追加や削除をすることはできません。
グループ内の役割として任意でご使用ください。

5-9.グループについて (登録、変更)

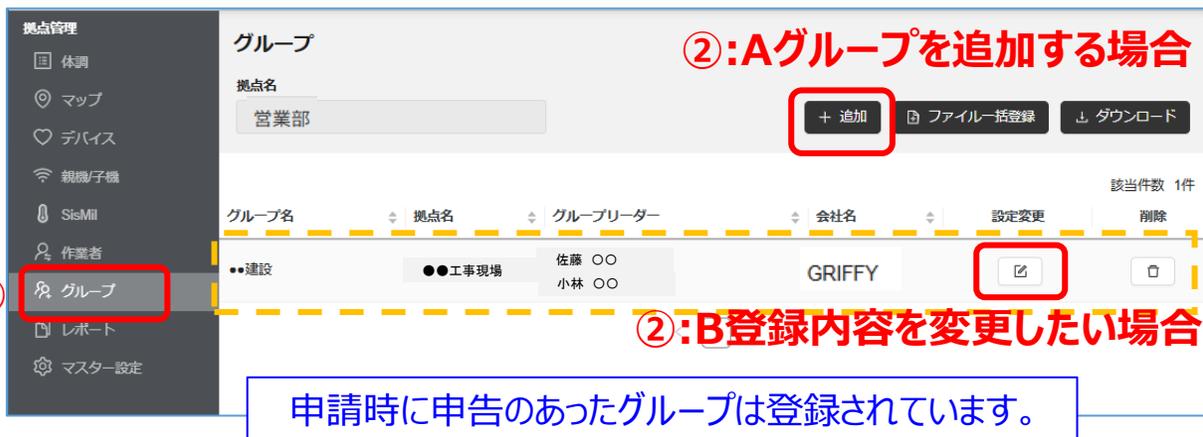

【設定手順】

- ① 「グループ」選択
 - ② グループを追加したい場合は・・・A
登録内容を変更したい場合は・・・B
※設定画面は A,B とも同じ画面です。
 - ③ ポップアップ画面より対象者を選択。(複数人選択可)
 - ④ リーダーのメールアドレスを入力して「追加」押下
※テストメールの送信、削除は各アドレス毎に実施できます
- | メールアドレス | テストメール送信 | 削除 |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| aaa@griffy.co.jp | テストメール送信 | <input type="button" value="削除"/> |
- ⑤ ポップアップ画面より対象者を選択。(複数人選択可)
 - ⑥ 「保存」押下 確認メッセージ OK

重複して別のグループに登録はできません。

