
5-9.『グループ』について



- グループ情報は事前にご提出いただいた情報で登録されています。
- グループリーダーが変更や、グループメンバーの追加削除が発生した場合は、設定の変更が必要になります。
- 新たなグループの作成も可能です。

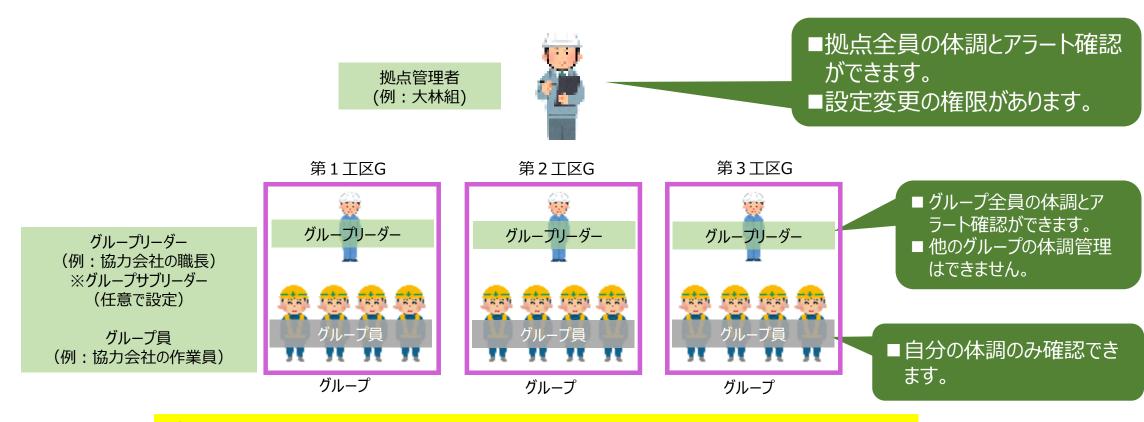

グループを設定することで、より早く熱中症などの体調変化に対応が可能となり、現場全体の監視が徹底されます。

※サブリーダーの閲覧権限はリーダーと同等ですが、リーダーの追加や削除をすることはできません。 グループ内の役割として任意でご使用ください。

5-9.グループについて (登録、変更)





【設定手順】


- ①「グループ」選択
- ② グループを追加したい場合は・・・A 登録内容を変更したい場合は・・B
 - ※設定画面は A,B とも同じ画面です。
- ③ ポップアップ画面より対象者を選択。(複数人選択可)
- ④ リーダーのメールアドレスを入力して「追加」押下

※テストメールの送信、削除は各アドレス毎に実施できます

メールアドレス	テストメール送信	削除
aaa@griffy.co.jp	テストメール送信	

- ⑤ ポップアップ画面より対象者を選択。(複数人選択可)
- ⑥「保存」押下 確認メッセージ OK

重複して別のグループに登録はできません。

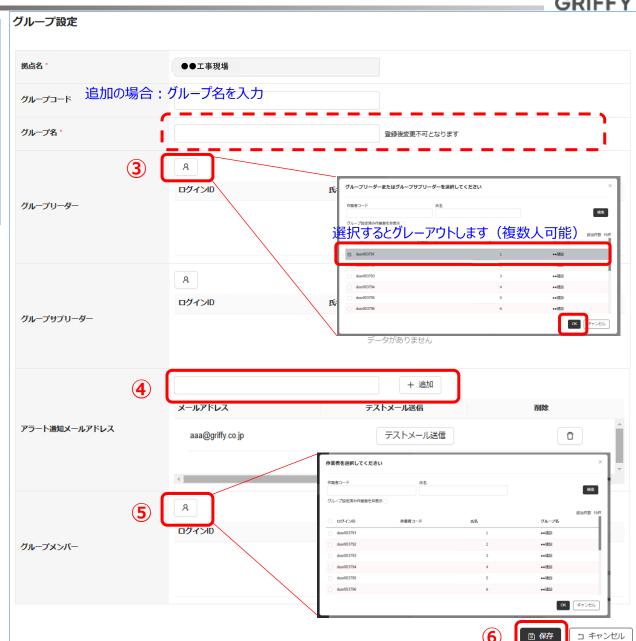

5-11.『マスター設定』について



● アラート発信のメール登録、各画面の表示内容などが設定できます。

拠点管理	拠点マスター設定
Ⅲ 体調	
◎ マップ	拠点名:営業部
♡ デバイス	
○ 親機/子機	
A SisMil	[1] 株調-筧画画表示項目設定 「体調」画面に表示する項目を選択可能
₽, 作業者	☑ 緊急 ☑ 総合アラート ☑ 氏名 ☑ 年齢 ☑ 拠点名 □ グループ
名 グループ	☑ 心拍数 ☑ WBGT超過度 ☑ WBGT値 ☑ WBGT測定地点 ☑ 位置情報 ☑ 經過時間
⑤ レポート	☑ パッテリ ☑ 電波強度
፡፡፡ マスター設定	
	121 メールアラート設定 拠点管理者はTOにカンマ区切り「,」で登録 アラート通知メールアドレス (カンマ区切りで複数指定可能です) aaa@griffy.co.jp,bbb@griffy.co.jp,ccc@griffy.co.jp, co.jp,

	総合アラートレベルとは別に契約ユニット管理者が設けた「要緊急アラート
【2-2】要緊急対応アラート	® が発生した場合のアラートメール送信を設定です。
心拍数が設定レベルを	を超過している時間が一定時間蓄積すると要緊急対応アラートのメールを送信します。
	○ オン ○ オフ
	設置している各親機、子機が、故障等で通信が不能状態を
【2-3】 死活監視アラート設	
組巻/ス巻 とのよれの	<mark>基本的にONでお願いします。</mark> ステータスか異名の場合にか法策限プラートのメールを送信します。
税機/丁機CSISMIIU)/	
	オン ○ オフ
	アラートメールの再送間隔、アラームが連発する際は変更することにより
【2-4】 一定期間発報抑止	一時的にメール停止されます。ただ、変更は関係者に要確認となります。
	ではいことが行在されるが、ただ、交叉は内が自じ交流的となりなり。
	5
【3】安全带表示設定	
	表示 ② 非表示
	e s